

Confort et sécurité

Pose et retrait
Entretien et conservation

passt.



Bon pour vos clients, bien pour vous, bien à long terme

Les lentilles de contact sur mesure ne sont pas un feu sans paille, mais un processus continu – et une affaire en cours

Chère lectrice, cher lecteur,

Des lentilles de contact ne sont pas seulement un produit mais un processus débutant avec votre conseil. Une fois l'adaptation elle-même terminée avec succès, la pose et dépose ainsi que l'entretien des lentilles continue.

C'est pourquoi nous ne vous livrons pas uniquement des lentilles de contact sur mesures mais aussi du savoir-faire sur mesure. Cela inclut notre Service Professionnel se tenant à votre disposition pour tout conseil. Il s'agit également des produits d'entretien et des accessoires offrant à vos clients un bien-être, une santé et sécurité absolue.

Les bonnes lentilles ont un nom. Les bons produits d'entretiens et les bons accessoires également : Appenzeller Kontaktlinsen.

Nous avons un objectif en commun : après l'adaptation et votre conseil, vos clientes et clients doivent être satisfaites à 100% avec vos lentilles. Et ceci à long terme. C'est pourquoi nous vous garantissons avec notre nom, que nos produits d'entretien et nos accessoires répondent aux exigences de qualité les plus élevées et méritent votre confiance.

Plus qu'ici, vous apprenez personnellement.

Sur les pages suivantes, nous vous donnons un aperçu. Vous pouvez aussi combiner les produits d'entretiens selon vos souhaits et vos besoins et le proposer à vos clientes et clients en set : des solutions complètes avec tous les produits d'entretien nécessaires au cas par cas.

Si vous avez besoin des renseignements complémentaires. N'hésitez pas à contacter notre Service Professionnel. Souhaitez-vous du conseil sur place : Appelez-nous ou écrivez-nous.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'avoir de vos nouvelles.



M'hamed Bouhlal, CEO
Appenzeller Kontaktlinsen AG

Contenu

→ Lentilles souples Page

Quotidien	Processus	Produit Option A	Produit Option B	
Pas 1	Nettoyer	Nettoyant	Nettoyant	5
Pas 2	Rincer	Saline	Saline	5
Pas 3	Désinfecter et conserver	Peroxid	All-in-One soft	6 / 8
1x par semaine additionnellement				
Pas 4	Déprotéinisation	Enzyme		7

→ Lentilles rigides Page

Quotidien	Processus	Produit Option A	Produit Option B	
Pas 1	Nettoyer	Nettoyant	Nettoyant	5
Pas 2	Rincer	Saline	Saline	5
Pas 3	Désinfecter et conserver	Peroxid	All-in-One RGP	9
1x par semaine additionnellement				
Pas 4	Déprotéinisation	Enzyme		7

→ Accessoires Seite

Produit	Spécification	
Etui à lentilles peroxyde	Pour peroxyde, pour grandes lentilles souples (y.c. lentilles sclérales)	12
Boîtier à lentilles		12
Aide à poser	Pour lentilles sclérales	13
	Pour lentilles sclérales et lentille mini-sclérales	13
Ventouses	A trou	13
	Sans trou	13
Pincette avec boîte, bleu		13
i-Case	Etui à lentilles, sur demande avec votre logo	14

1. Nettoyer

Lentilles souples et rigides

Nettoyant à base d'alcool pour l'entretien quotidien des lentilles rigides perméables aux gaz et des lentilles souples.

2. Rincer

Lentilles souples et rigides

passt.

La solution saline pour rinçage pour toutes les lentilles de contact, souples et rigides. A utiliser pour rincer après le nettoyage des lentilles et également pour poser la lentille sur l'œil – sauf lentilles sclérales.



3. Désinfection et conservation

passt.

Lentilles souples et rigides

→ 1 heure – fini

C'est facile, rapide et à 100% efficace de désinfecter et de neutraliser les lentilles de contact.

Grâce à Appenzeller Kontaktlinsen c'est possible avec ce système peroxyde. Pour toutes les lentilles souples traditionnelles, lentilles de remplacement fréquent ou des lentilles rigides perméables aux gaz.

1 emballage = quantité mensuel

Un emballage contient 360 ml de solution de désinfection et 36 comprimés pour la neutralisation.

Disponible aussi en set de 2 ou 3 emballages

Ou en combinaison avec d'autres produits d'entretien. Un mois passe vite. C'est pourquoi nous vous offrons notre système peroxyde en set de 2 ou 3 emballages entouré par un film transparent fin, facilement à enlever sans utiliser des ciseaux ou couteaux.

Votre set à 100% selon vos besoins

Vous pouvez configurer votre set tout à fait individuellement selon vos besoins. Voir page 10/11.

→ Le stockage adéquat

Pour des grandes lentilles souples jusqu'aux lentilles sclérale, des grandes corbeilles. Pour des systèmes peroxydes sans catalyseur.

→ Notre conseil : essayez tout simplement

Le kit de départ afin de laisser vos clientes et clients découvrir le système peroxyde en le testant encore et encore pour être finalement convaincu.



4. Déprotéinisation 1x par semaine

Lentilles souples et rigides

passt.

→ Le problème

Des protéines se déposent tous les jours sur les lentilles. En plus de la désinfection et neutralisation quotidienne des lentilles, une déprotéinisation hebdomadaire est nécessaire lors de l'utilisation du système peroxyde.



Désinfection et conservation

passt.

L'option pour des lentilles souples

→ Les avantages
d'All-in-One soft

Une hydratation maximale, une durée de port prolongé et un confort prolongé.

Pour tous ceux qui n'optent pas pour le système peroxyde et son effet exceptionnel rapide, désinfection et neutralisation en 1 heure (voir page 6).

Vous voyez ici la solution multifonction au hyaluronate de sodium. L'étui se trouve quelques pages plus loin.

- Le boîtier à lentilles pour votre salle d'adaptation → Page 12
- L'étui i-case avec votre logo → Page 14

→ Notre conseil :
essayez tout
simplement

Le kit de départ afin de laisser vos clientes et clients découvrir le système peroxyde en le testant encore et encore pour être finalement convaincu.

1 kit de départ contient 60ml de solution multifonction



→ Les avantages
d'All-in-One RGP

All-in-One RGP est tout simplement un produit de désinfection.

Pour tous ceux qui n'optent pas pour le système peroxyde et son effet exceptionnel rapide, désinfection et neutralisation en 1 heure (voir page 6).

Vous voyez ici la solution multifonction pour des lentilles de contact rigides perméables aux gaz. L'étui se trouve quelques pages plus loin.

- L'étui i-case avec votre logo → Page 14



D'une manière

Soit des produits uniques ...

Appenzeller Kontaktlinsen ne vous offre pas seulement toutes les lentilles, mais aussi tout, pour que vos clientes et clients ont du plaisir avec leur lentilles et ceci aussi longtemps que possible.

→ Fidélisation de la clientèle, sécurité et confort

Vous aussi pouvez avoir du plaisir. Parce que des clientes et clients qui ont acheté chez vous une fois des produits d'entretiens reviennent régulièrement.

Et : des clientes et clients portant des lentilles d'Appenzeller Kontaktlinsen et utilisant des produits d'entretien et accessoires d'Appenzeller Kontaktlinsen sont des meilleurs clientes et clients pour vous et pour nous.

- Leur lien est plus grand
- Leur sensation de sécurité et confort est plus élevé
- Leur fidélité est plus grande

→ Quelle configuration souhaitez-vous pour vos clients ?

L'ordre est : Nettoyer et rincer, désinfecter et conserver. Nous vous proposons des produits d'entretiens assortis selon vos besoins et souhaits. Esthétique comme set – entouré par un film transparent fin, facilement à enlever sans utiliser des ciseaux ou couteaux.

→ Exemples de configuration

- 1x Nettoyant + 1x Saline
+ 1x Peroxyde + 1x Enzyme
- 1x Nettoyant + 1x Saline
+ 1x All-in-One soft
- 1x Nettoyant + 1x Saline
+ 1x All-in-One RGP

Bien entendu, toute autre configuration est possible, comme vous le désirez.

→ Notre service externe: à votre écoute de vos questions et vos demandes

Quelle configuration est conseillée pour vous et vos clientes et clients ?

- Combien cela coûte, si vous commandez une certaine quantité ?
- Quelles sont les conditions de livraison et de paiement ?

Il n'y a qu'une seule réponse à toutes ces questions : Parlez-en avec nous ou nos commerciaux.

ou d'une autre:

...ou en set – configuré selon vos souhaits.

→ Tous les produits sont disponibles en set de 2 ou 3

Appenzeller Kontaktlinsen Peroxid



Appenzeller Kontaktlinsen All-in-One RGP



Appenzeller Kontaktlinsen All-in-One soft



→ Ou en set de 2 ou de 3 avec notre nettoyant

Appenzeller Kontaktlinsen Reiniger + Peroxid



Appenzeller Kontaktlinsen Reiniger + All-in-One RGP



Appenzeller Kontaktlinsen Reiniger + All-in-One soft



→ ...pour ne citer que quelques-unes des nombreuses combinaisons possibles

Conserver

passt.

Lentilles sclérales

→ Système peroxyde sans catalyseur

Des grandes corbeilles pour des grandes lentilles souples et lentilles sclérales. Peut-être utilisé avec l'Appenzeller Kontaktlinsen Peroxyd



Toutes les lentilles

→ Pincette bleu

Avec une pointe en silicone transparente. Livrée dans une boîte pour des raisons pratique et hygiénique



→ Boîtier à lentilles

Idéal pour la salle d'adaptation. Ce boîtier transparent est robuste et hygiénique. Il convient également pour des grandes lentilles.



Poser et retirer

Lentilles sclérales et mini-sclérales

→ Pour poser des lentilles sclérales et mini-sclérales «Moritz»

Avec une lumière de fixation



→ Pour poser des lentilles sclérales «Max»

La pose des lentilles devient un jeu d'enfant.

- Poser la lentille dans le creux
- Glisser cette aide à la pose comme une bague sur le bout du doigt
- Poser la lentille d'abord en bas et ensuite en haut



Lentilles rigides

passt.

→ Pour poser et retirer des lentilles rigides

La ventouse classique avec trou



→ Pour retirer des lentilles rigides

La ventouse classique sans trou



Stocker selon votre coutume

passt.

i-Case

→ Vos client(e)s pensent tous les jours à vous

Quand ils voient tous les jours votre logo. Nous mettons votre logo sur le couvercle gauche de cet étui et ceci gratuitement. Seule condition : vous commandez au moins 300 pièces.

1. 5 couleurs sont à disposition

- jaune.....RAL 1018
- orange.....RAL 2009
- rouge.....RAL 3020
- vert.....RAL 6024
- bleu.....RAL 5005

2. 3 possibilités de design à choix

- Votre logo.....Quantité minimale : 300 ex.
- Notre Logo.....aucune quantité minimale
- Couvercle vierge.....aucune quantité minimale



appenzeller
kontaktlinsen

passt.



passt.

10 Points

Ce qui plaide pour Appenzeller Kontaktlinsen.

→ Succès d'adaptation

Nous nous efforçons de comprendre vos besoins et vos idées pour vous assurer que votre adaptation soit une réussite pour vous et vos clients.

→ Technologie de pointe

Nous investissons énormément dans la recherche et le développement. Pour garantir que nos produits bénéficient des toutes dernières avancées technologiques.

→ Swiss made

Nous sommes très exigeant sur la qualité de fabrication nos lentilles de contact. Afin qu'elles correspondent à vos attentes du «Swiss made».

→ Reproductibilité

Nous portons une attention permanente au suivi de nos clients afin que vous obteniez les mêmes lentilles lors des renouvellements.

→ A votre écoute

Notre service professionnel fournira des conseils compétents et personnels avec patience afin que vous receviez une réponse à chacune de vos questions et la lentille adéquate.

→ Travail sur mesure

Nous produisons chaque lentille de contact individuellement, pour vous. Cela signifie qu'elle correspond à 100% à vos spécifications.

→ Droit d'échange

Nous vous fournissons nos lentilles de contact avec ou sans droit d'échange. Pour vous aider à faire le meilleur choix pour vos besoins. L'option « droit d'échange », vous donne la sécurité financière. Parce que vous pouvez ensuite acheter une autre lentille. Faites ceci pendant la période du droit d'échange, vous ne payerez qu'une franchise. Seule la date sur le bon de livraison est décisive pour la période d'échange. Lentilles souples : 2 mois droit d'échange pour lentilles semestrielles, 3 mois droit d'échange pour lentilles annuelles. Lentilles rigides 3 mois droit d'échange.

→ Prix avantageux

Nous offrons des conditions de paiement particulièrement avantageuses. Afin d'en profiter prenez contact avec nous pour les termes et conditions.

→ Garantie

Nous prenons grand soins à produire nos lentilles. Alors vous pouvez compter sur nous pour vous garantir nos lentilles de contact. Lentilles semestrielles 2 mois/lentilles annuelles 3 mois. Une lentille cassée ? Renvoyez la pendant la période de garantie et nous vous la remplaçons. Lors de votre prochaine commande, nous accorderons une note de crédit correspondante. Décisif pour la période de garantie est la date sur le bon de livraison.

→ Optique à long termes

Nous aspirons à une relation professionnelle à long terme avec vous. Afin qu'inversement vous puissiez aussi compter sur nous à long termes.